




Памятка для врача по использованию AMA RUT Pro

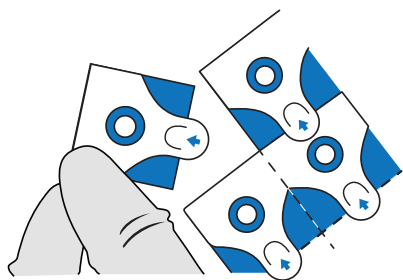


Согните блок по линиям перфорации и отделите один сегмент для исследования.

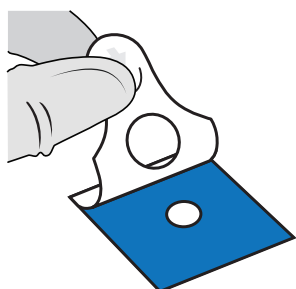


Откройте защитную пленку, но не тяните сильно, чтобы ее не оторвать.

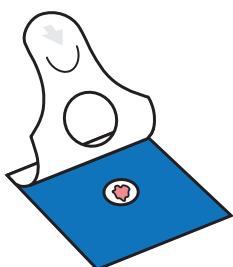


Поместите биоптат на белый чувствительный элемент, а не за его пределы.

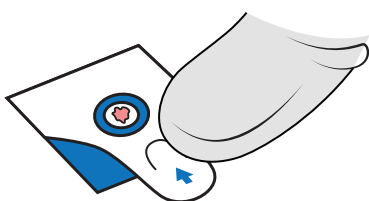

Поместив биоптат, аккуратно пригладьте защитную пленку пальцем по периметру изделия.

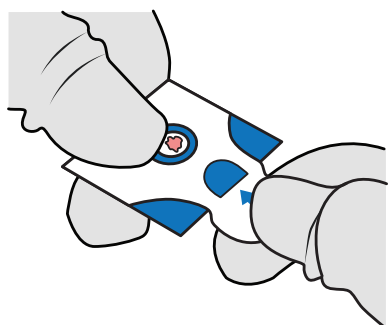

Зафиксируйте пленку по линии выреза. Фиксация необходима для сохранения продуктов реакции в ячейке экспресс-теста.

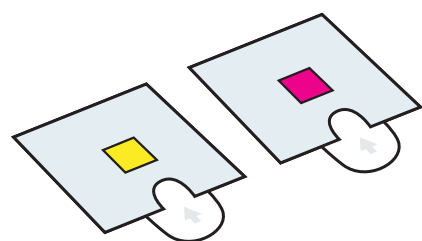

Оцените результат исследования с обратной стороны экспресс-теста через **5 минут**.

Перед эксплуатацией экспресс-теста ознакомьтесь с Инструкцией по применению.